



Prime 17B


符合 EN 13060 Class B 等級抽真空高壓蒸氣滅菌鍋
提供快速的滅菌與高效的乾燥效果

搭配 4.3 吋彩色觸控面板，使用者只需選擇並啟動程序，
滅菌流程就會自動運行，中間無需額外的操作，
使每個人都可以進行高標準的滅菌作業。

在簡單友好的操作介面背後，包括一系列頂級的設備技術，
例如：

- 強大的抽真空幫浦
- 瞬熱式蒸汽產生器
- 可靠的滅菌追溯系統
- 自動的維修保養提示

使醫護人員能夠沒有任何顧慮的輕鬆完成滅菌工作，
實現安全、卓越的滅菌效能。

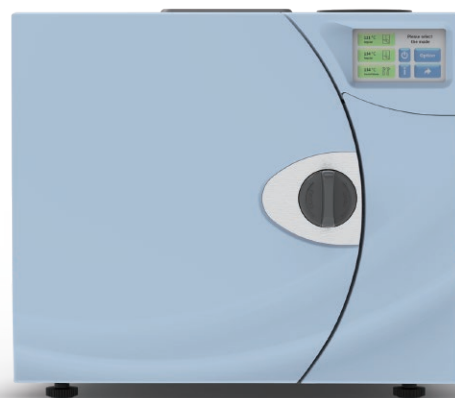

產品特點

安全性及效能	符合歐盟 EN 13060 Class B 要求之桌上型高溫高壓蒸氣滅菌鍋，擁有卓越的滅菌效能與安全性。
智慧壓力門鎖	當內鍋壓力超過安全範圍值後，自動將內鍋門上鎖保護操作者安全。
雙水箱設計	清水與廢水獨立並分離，保持水質潔淨減少積累礦物質、鹽分和其他雜質，避免形成水垢或滋生微生物，進而影響滅菌效果。
水位提示警報	三重水位警報自動偵測，當清水箱水位不足、過高或當廢水箱水位過高時將會有圖像提示。
觸控螢幕	全彩觸控螢幕提供直觀的操作介面，就像使用智慧型手機一樣，只需幾個觸控即可完成操作。
抽真空幫浦	預抽真空 & 真空乾燥。
瞬熱式蒸汽產生器	擴增內鍋的可滅菌容積，更能高效的產生飽和蒸汽，提升整體滅菌效率。
滅菌追溯系統	內建 10 筆滅菌資料記憶體，有效降低了在移動資料時由於遺忘插入儲存裝置而導致滅菌資料未儲存的失誤風險，可選配外部印表機以紙本形式即時列印儲存滅菌資料。
維修保養提示	當耗材或保養次數到達時將，自動提醒更換，確保設備的安全性，延長使用壽命的同時也確保了滅菌效果。

規格	Prime 17B
內鍋容積	17 公升
內鍋尺寸 (Ø x 深)	Ø 240 x 360 mm
內鍋設計壓力	2.8 kg/cm ²
內鍋設計溫度	150°C
外觀尺寸	470(W) x 560(D) x 440(H) mm
淨重	45 kg
總電功率	220 VAC, 50/60 Hz, 2310 W
蒸氣產生方式	蒸汽產生器
儲水箱儲水量	最大容量 4 公升
廢水箱儲水量	最大容量 2.5 公升
操作環境	安裝地點在海拔高度在 1,000 m 以下 環境溫度 4°C ~ 40°C 相對溼度 80%RH 31°C ~ 50%RH 40°C

標準配件



滅菌盤架組

可容納三個金屬網托盤
由 304 不銹鋼製成，托盤尺寸
178 (寬) x 21.5 (高) x 305 (深) mm



基礎配件

- 操作手冊 x 1 pc.,
- 快速接頭排水管 x 1 pc.,
- 內鍋清潔劑 x 2 pcs.

程序名稱		滅菌時間	乾燥時間	總行程時間*
121 °C Regular Dry		20 min	15 min	56 min
134 °C Regular Dry		4 min	15 min	41 min
134 °C Dental Soft Dry		4 min	15 min	44 min
134 °C Flash Dry		4 min	1 min	17 min
134 °C Unwrapped Short Dry		4 min	5 min	43 min
134 °C Prion Long Dry		18 min	15 min	56 min
Dry		-	-	-
B & D Test		-	-	-
Vacuum Test		-	-	-

* 總行程時間為大約值，具體時間將取決於負載量
上述表格時間是基於冷鍋、最小負載為基礎並包括乾燥時間

Sturdy
Wellell Group

248012 新北市五股區中興路一段 168 號
電話：+886 2 2981 5245
傳真：+886 2 2981 5245
信箱：foreign@sturdy.com.tw
www.sturdy.com.tw



新駿實業對本型錄所刊載之產品資料保留修改權利，恕不另行通知。

CE 2460 CE 0035

